



LAB - nytt nr 5-2014

Nye prøverør til glukosebelastning

Nye prøvetakingsrør til glukosebelastning (oral glukosetoleranse test – OGT).

Vi anbefaler å ta i bruk Terumo Venosafe Glycaemia spesialrør (FC-mix) til måling av glukose ved glukosebelastning. Tilsetningsstoffa (Na-fluorid, citrat og EDTA) vil stoppe glykolysen umiddelbart og er derfor bedre enn vanlege serumrør.

Terumo Venosafe Glycaemia spesialrør kan de få ved å henvende dykk til samarbeidande laboratorium i Helse Førde (Førde, Lærdal, Nordfjord)

Prøvetaking: Vend røra forsiktig 8 – 10 ganger. I tillegg til pasientidentifikasjon skal røra merkast med prøve 1 og prøve 2, samt klokkeslett.

Røra skal ikkje sentrifugerast. Dei er haldbare i 2 døgn ved romtemperatur.

De kan framleis sende serum til glukosebelastningstest, men det er då viktig at prøven blir sentrifugert innan 30 minutt.

Førde 18. september 2014

Rune J. Ulvik
overlege

Åse Reikvam
avdelingssjef