

Blodprøve for analyse av Jak2 V617F

Prøvetaking av blodprøve for analyse av Jak2 V617F mutasjon i myeloproliferative tilstandar skal utførast på LMBB på Førde sentralsjukehus.

Bruk 3 ml EDTA røyr. EDTA røyret fyllast til angitt volum. Vend 10 gonger etter prøvetaking og plasser i kjøleskåp. Prøven er haldbar 72 timar i kjøleskåp. Analyse for Jak2 V617F utførast av molekylærbiologisk eining på avdeling for patologi, bruk rekvisisjon for molekylærpatologisk undersøking.

Sist oppdatert 26.03.2017 Tonje B Riste