

Biopsimateriale

Analysemetode

Bakteriologisk dyrking, aerob og anaerob.

Indikasjon

Mistanke om bakteriell infeksjon.

Prøvetaking

Ved mistanke om anaerob infeksjon må dette skrivast spesielt på rekvisisjonen. Unngå ureining av prøven med normalflora frå slimhinner/hud.

Prøvetakingsutstyr

Biopsien takast aseptisk og leggst i eit steril container tilsett nokre dråpar sterilt fysiologisk saltvatn, slik at den ikkje tørkar ut.



Oppbevaring før transport

I kjøleskap

Haldbarheit

3 døgn. Eldre prøvar vurderast.

Vurdering i laboratoriet

Sjå [Bakteriologisk dyrking, anaerob.](#)

Forventa analysetid

3-8 dagar

Feilkjelder

Bakteriell kontaminasjon av prøvematerialet med normalflora av kan gje falskt positivt resultat.

Lufteksponering av prøvematerialet og lang transporttid til laboratoriet kan gje falskt negativt resultat.

Utførast av

Bakteriologisk fagområde

Fagområde

Bakteriologi

Rekvisisjonsskjema

HF Skjema 1084

HF Skjema 1088

Medisinsk fagleg ansvarleg

Reidar Hjetland

Sist oppdatert

02.11.2016 Gro Øren