

Gjærsopp

Analysemetode

Gjærsopp-dyrking på selektive soppskåler.

Indikasjon

Klinisk mistanke om gjærsoppinfeksjon som intertrigo, bleieutslett, trøske i munnen, evt. djupare gjærsoppinfeksjonar. Obs: For soppvaginitt bør legen sjølv stille diagnosen klinisk og ved mikroskopi av vaginalsekret. Sjå kapitlet [Genitalprøvar, kvinner](#).

Prøvetaking

Prøve takast med vanleg bakteriologisk pensel.

Prøvetakingsutstyr

Ein nyttar vanleg bakteriologisk pensel i transportmedium:

Svart kork: Tjukk pensel:



eller oransje kork: Tynn pensel.

Oppbevaring før transport

I kjøleskap.

Haldbarheit

1 veke. Eldre prøvar kommenterast i svar.

Vurdering i laboratoriet

For polikliniske prøvar utførast vanlegvis ikkje nærare identifikasjon, og prøven svarast med "Gjærsopp". For inneliggande pasientar utførast vanlegvis diagnostikk av *Candida albicans*, og prøva svarast med "*Candida albicans*" eller "Gjærsopp".

Vi utfører ikkje resistensbestemming av gjærsopp ved vårt laboratorium. For isolat frå blodkultur eller mistenkt systemiske/alvorlege infeksjonar sendast isolatet til anna laboratorium for nærare identifikasjon og resistensbestemming. Generelt gjeld at *Candida albicans* for tida kan reknast som sensitiv for fluconazol, mens andre gjærsoppartar har varierende sensitivitet for dette middelet.

Forventa analysetid

2-3 dagar.

Feilkjelder**Utførast av**

Bakteriologisk fagområde

Fagområde

Mykologi

Rekvisisjonsskjema

Skjema HF 1084

Skjema HF 1088

Medisinsk fagleg ansvarleg

Reidar Hjetland

Sist oppdatert

27.10.2016 Gro Øren