

# KOH-preparat

## Analysemetode

Mikroskopi

## Indikasjon

Mistanke om mistanke om pityriasis versicolor i hud. Evt. dermatofytt-infeksjonar.


## Prøvetaking

Prøvar frå hud takast ved å skrape av litt av huda frå kanten av lesjonane med kniv eller skarp skei. Dersom lesjonane syner perifer spreining, takast prøven frå den progredierande randsona.

(Obs. Prøvar frå hud, hår og negler kan av rekvirenten sjølv undersøkast direkte i eit kalilutpreparat: Materialet leggst på eit objektglas, nokre dråpar 10-30% KOH dryppast på og preparatet varmast forsiktig opp over gassflamme utan at preparatet kokar.)

## Prøvetakingsutstyr

Prøvar frå hud kan sendast mellom to reine objektglas som festast saman med tape.

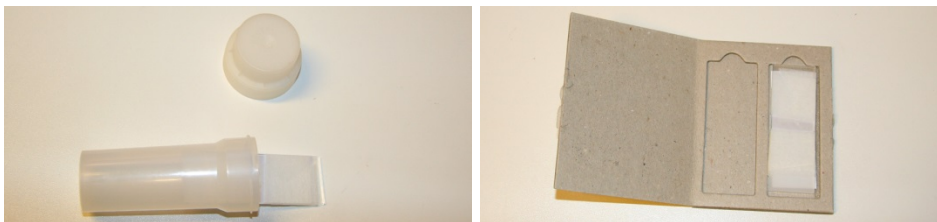

## Oppbevaring før transport

I romtemperatur/kjøleskap.

## Maksimal transporttid til laboratoriet

1 veke.

## Vurdering i laboratoriet

Vi utfører ikkje rutinemessig mikroskopi av kalilutpreparat unntatt ved opplyst mistanke om pityriasis versicolor (*Malassezia furfur* veks ikkje på våre standardskåler) og elles der det er eksplisitt rekvirert.

## Forventa analysetid

1-2 dagar

## Feilkjelder

Ved for sparsomt materiale kan ein gå glipp av soppement ved mikroskopi. Salve på huda kan av og til øydelegge mikroskopien.

## Utførast av

Bakteriologisk fagområde

**Fagområde**

Mykologi

**Rekvisisjonsskjema**

Skjema HF 1084

Skjema HF 1088

**Medisinsk fagleg ansvarleg**

Reidar Hjetland

**Sist oppdatert**

11.10.2016 Gro Øren