

# Tape-preparat, *Enterobius vermicularis*

## Analysemetode

Mikroskopi

## Indikasjon

Mistanke om barnemark hos barn og voksne (analkløe)

## Prøvetaking

Nokre centimeter med klar gjennomsiktig tape trykkjast med lomsida mot sidene av endetarmsåpninga, helst nokre timar etter sengetid eller om morgonen før toalettbesøk. Tapen limast så på eit objektglas som merkast med pasienten sitt namn og fødselsnummer. Prøven sendast i transporthylse.

## Prøvetakingsutstyr

Objektglas, transporthylse:



## Oppbevaring før transport

I kjøleskap.

## Haldbarheit

Leverast snarast. Eldre prøvar kommenterast i svar.

## Vurdering i laboratoriet

Vanleg fecesprøve har dårleg sensitivitet for påvising av *Enterobius vermicularis* (barnemark). Tape-preparat er føretrekt metode. Denne har i følgje litteraturen ein sensitivitet på 50% etter ei prøve og 90% etter tre prøvar.

## Forventa analysetid

1-2 dagar.

## Feilkjelder

## Utførast av

Bakteriologisk fagområde

**Fagområde**

Parasittologi

**Rekvisisjonsskjema**

Skjema HF 1084

Skjema HF 1088

**Medisinsk fagleg ansvarleg**

Reidar Hjetland

**Sist oppdatert**

31.05.2017 Gro Øren